


УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 99450
ПОЛКОВНИК

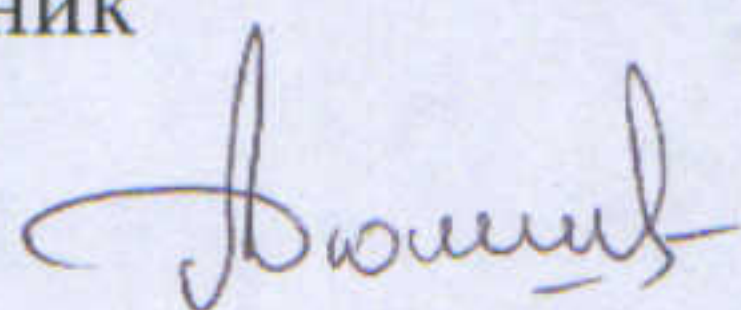


А. Дюмин

" 16 " июля 2013 года

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 92154
ПОЛКОВНИК

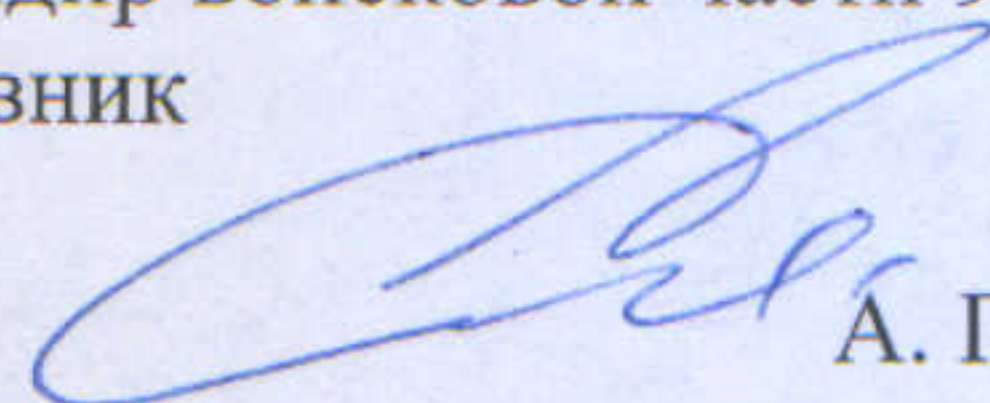

А. Галкин

" 12 " июля 2013 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № _____

проведения эксплуатационных испытаний медицинского
средства "Эплан"® от "100 ран"® (салфетки)
и защитного средства "Эплан"® (раствор)
(«Программа и методики эксплуатационных испытаний
серийных образцов медицинских изделий и программного
обеспечения» пункт 8 подраздела 1.1)

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ-**
заместитель командира войсковой части 92154
ПОЛКОВНИК



С. Москаев

« 11 » июля 2013 г.

1. Объект испытаний

Салфетки антисептические, стерильные "Эплан"® от "100 ран"®, далее по тексту медицинское изделие "Эплан"® от "100 ран"® – для обработки и лечения ран, ожогов I, II и III степеней, гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки, поверхностных ушибов и других травм кожи. Обладает одновременно выраженным антимикробным, бактерицидным, бактериостатическим, ранозаживляющим, регенерирующим, местным обезболивающим действием. Производитель ООО «ВПК».

Средство для защиты кожи "Эплан"® при негативном влиянии окружающей среды, далее по тексту защитное средство "Эплан"® (раствор). Производитель ЗАО «Оберон».

2. Цель испытаний

Определение специалистами войсковой части 92154 возможности использования медицинского изделия "Эплан"® от "100 ран"®, защитного средства "Эплан"® и выдача рекомендаций по их применению для частей и подразделений ВС РФ.

3. Материально-техническое обеспечение испытаний

Медицинское изделие "Эплан"® от "100 ран"®(салфетки) – 200 пак., защитное средство "Эплан"® (раствор) – 30 флаконов по 20 мл предоставлено производителями: ООО «ВПК», ЗАО «Оберон».

4. Условия проведения испытаний

Эксплуатационные испытания проводились в соответствии с рекомендациями по использованию в кабинетах медицинского центра, в подразделениях во время мероприятий повседневной деятельности части и в соответствии с планом боевой подготовки на объектах учебно-материальной базы в ППД.

Климатические условия соответствовали требованиям предъявляемым к служебным помещениям: температура воздуха от +20°C до +22°C, влажность воздуха 50% - 70%. При размещении в штатном обмундировании использовалось в климатических условиях соответствующих данному времени года вне помещений: температура воздуха от -20°C до +2°C, влажность воздуха 20% - 70%. Отклонений от методики испытаний не было.

5. Результаты испытаний

5.1. Проведение испытаний.

Испытания проведены в полном объеме.

Хранение осуществлялось согласно рекомендациям. Повреждений изделий в процессе использования не выявлено. С экипировкой и

вооружением военнослужащих при выполнении ими функциональных обязанностей в ходе мероприятий учебно-боевой подготовки медицинское изделие "Эплан"® от "100 ран"® и защитное средство "Эплан"® сочетается.

В процессе эксплуатационных испытаний рассматривалось применение медицинского изделия "Эплан"® от "100 ран"® и защитного средства "Эплан"® для испытуемой группы и применение штатных медицинских средств для контрольной группы военнослужащих.

5.1.1. Проведение испытаний медицинского изделия "Эплан"® от "100 ран"®.

Группы формировались по мере необходимости для оказания медицинской помощи военнослужащим.

Медицинское изделие "Эплан"® от "100 ран"® применялось как при оказании первой помощи, так и в лечении ран, дерматитов и других поражений кожи различной локализации и этиологии, преимущественно в гнойно-некротической стадии и в стадии заживления.

Медицинское изделие "Эплан"® от "100 ран"® применялось в процессе оказания первой помощи и лечения 30 военнослужащих испытуемой группы.

Штатные медицинские средства, применялись в процессе оказания первой помощи и лечения 25 военнослужащих контрольной группы.

Испытания медицинского изделия "Эплан"® от "100 ран"® показали высокую эффективность данного препарата в сравнении с аналогичными штатными медицинскими средствами, а именно:

- ускоренное заживление ран;
- отсутствие возникновения вторичных инфекций;
- атравматичность медицинского изделия (не прилипает к ранам);
- сокращение сроков амбулаторного и стационарного лечения;
- сокращение сроков восстановления трудоспособности и возвращения в строй военнослужащих после травм и ранений;
- сокращение времени оказания помощи военнослужащим;
- экономия перевязочного материала ввиду компактности, простоты и удобства применения повязки, хорошей фиксации ее на раневой поверхности любой конфигурации.

5.1.2. Проведение испытаний защитного средства "Эплан"® (раствор).

Защитное средство применялось при воздействии пониженных температур, ветра для защиты кожи лица (рук) от обморожения, раздражения, обветривания, огрубления и других повреждений.

Защитное средство "Эплан"® применялось в процессе осуществления учебно-боевых мероприятий 20 военнослужащими испытуемой группы.

Контрольная группа состояла из 20 военнослужащих.

В процессе учебно-боевых мероприятий военнослужащие испытуемой группы не испытывали дискомфорта от воздействия на кожу лица и рук, обработанных защитным средством "Эплан"®, пониженных температур, ветра и др. Случаев обморожения, раздражения, обветривания, огрубления и других повреждений кожного покрова не наблюдалось.

В процессе учебно-боевых мероприятий у военнослужащих контрольной группы наблюдалось проявление признаков раздражения кожных покровов под воздействием низких температур.

6. Заключение и рекомендации

6.1. Заключение.

Объем испытаний достаточен для принятия решения. В ходе войсковых испытаний учет, хранение и выдача опытных образцов организовано личным составом медицинской службы обычным порядком. Пополнение запасов возможно установленным порядком по нормам текущего довольствия.

Размеры медицинского изделия и защитного средства позволяют хранить их в карманах обмундирования и снаряжения военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. Изделия сочетаемы с экипировкой военнослужащих при выполнении ими функциональных обязанностей в ходе мероприятий боевой подготовки.

6.2. Рекомендации.

Салфетки антисептические, стерильные "Эплан"® от "100 ран"® целесообразно применять при оказании первой медицинской помощи, обработке и лечении ран, ожогов, ссадин, ушибов, иных травматических повреждений кожных покровов, гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки различной локализации и этиологии во всех фазах раневого процесса, профилактике вторичного инфицирования. Также в процессе испытаний определена целесообразность использования Салфеток антисептических, стерильных "Эплан"® от "100 ран"® при пневмотороксе, в случае отсутствия специальных табельных медицинских средств.

Защитное средство "Эплан"® целесообразно использовать при негативном воздействии окружающей среды на кожный покров военнослужащих.

Для использования в войсковой части 92154 рекомендуется включить в норму снабжения медицинское изделие "Эплан"® от "100 ран"® и защитное средство "Эплан"®.

7. Выводы

7.1 Считать этап войсковых испытаний выполненным в полном объеме.

7.2 Испытания медицинского изделия "Эплан"® от "100 ран"® показали высокую эффективность данного препарата в сравнении с аналогичными штатными медицинскими средствами.

7.3 Испытания защитного средства "Эплан"® (раствор) при негативном воздействии окружающей среды, показали высокую эффективность данного препарата.

7.4 Эффективность испытанных изделий сохраняется в заявленных условиях эксплуатации. Целесообразно принять медицинское изделие


"Эплан"® от "100 ран"® и защитное средство "Эплан"® на снабжение в войсковой части 92154 и в частях и подразделениях ВС РФ.

7.4 Рекомендуются нормы снабжения частей и подразделений Министерства обороны из расчета:

– медицинское средство "Эплан"® от "100 ран"® – 25 изделий на 1 год на 1 военнослужащего;

– защитное средство "Эплан"® в фасовке 20 мл – 12 изделий на 1 год на 1 военнослужащего.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИССИИ:

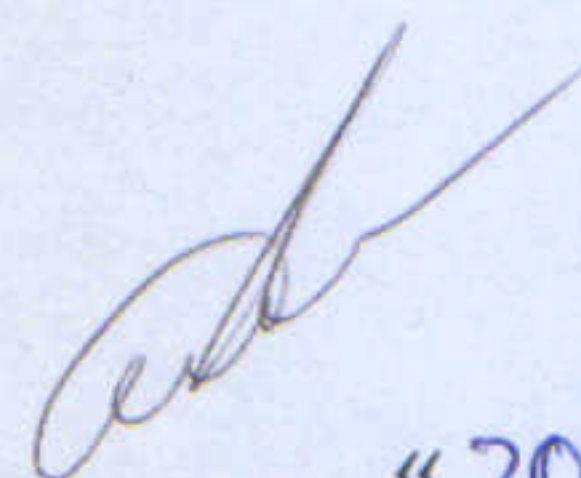


Р. Амиров

« 20 » мая 2013 г.



В. Болехан

« 30 » мая 2013 г.

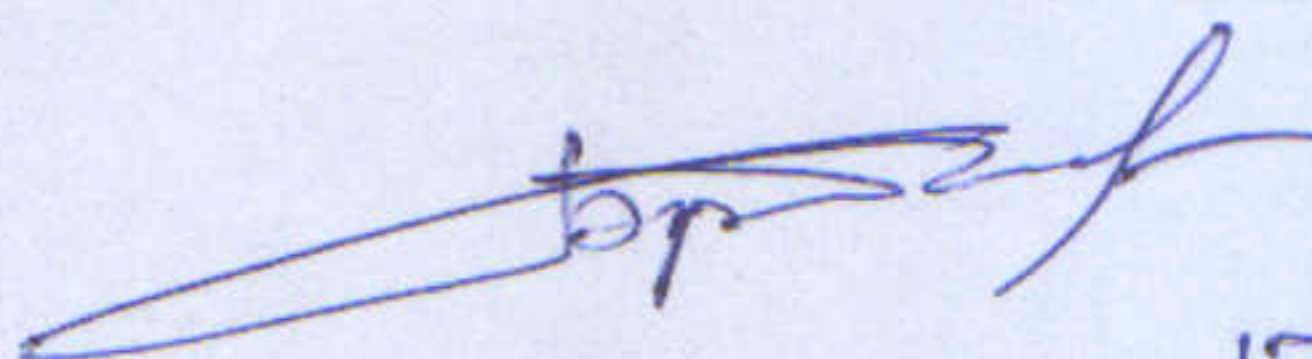

Г. Рябчиков

« 17 » мая 2013 г.




А. Писарев

« » мая 2013 г.



С. Стариков

« 21 » мая 2013 г.

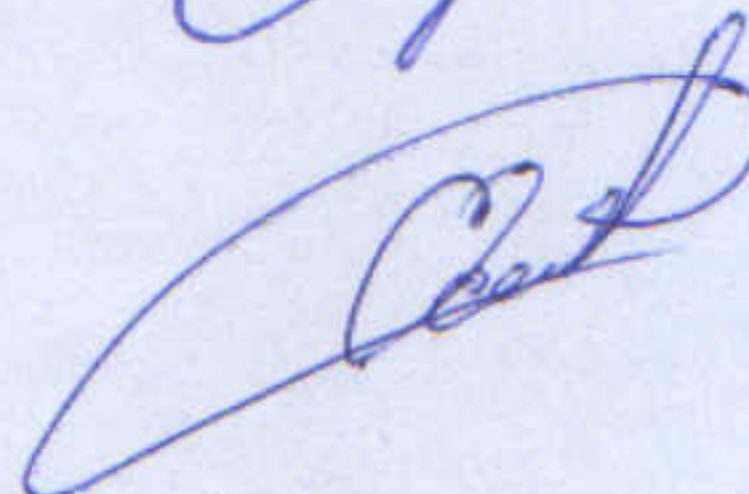


А. Осипов

« 20 » мая 2013 г.



Д. Зайцев

« 20 » мая 2013 г.

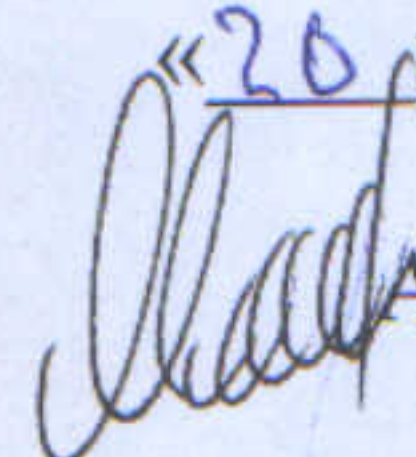

А. Мелешкин

« » мая 2013 г.




Б. Маканов

«20» мая 2013 г.



Н. Степанов

«20» мая 2013 г.

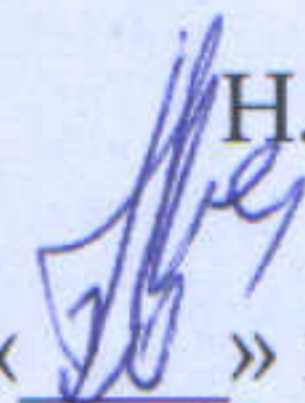

Н. Тимофеев

«20» мая 2013 г.



П. Курчаков

« » мая 2013 г.